



- › Exploration
- › Exploring
- › Untersuchung

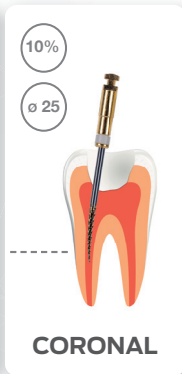


- › Évasement coronaire
- › Coronal flaring
- › Kronenerweiterung

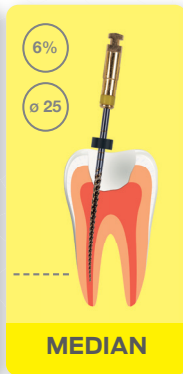


- › Élargissement de la partie médiane
- › Enlarging the middle part
- › Erweiterung des mittleren Abschnitts



- › Longueur de travail
- › Working length
- › Optimale Kanallänge

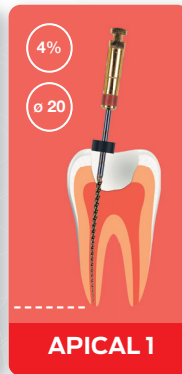

- › Préparation apicale
- › Apical preparation
- › Vorbereitung des apikalen Abschnitts

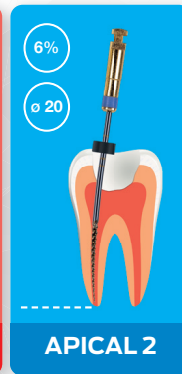

- › Finition avant obturation
- › Finishing before filling
- › Reinigung vor dem Füllen

Vitesse : 300 à 400 tr/min – **Torque :** 2 N/cm

Speed: 300 to 400 rpm – **Torque:** 2 N/cm

Geschwindigkeit: 300 bis 400 U/Min – **Drehmoment:** 2 N/cm

10%

ø 25



CORONAL

- › Évasement et désobturation
- › Flaring and removal of filling material
- › Erweiterung und Entfernen der Füllung

6%

ø 25



MEDIAN

- › Évasement de la partie médiane
- › Flaring the middle part
- › Erweiterung des mittleren Abschnitts

4%

ø 20



APICAL 1

- › Désobturation et préparation apicale
- › Removal of filling material and apical preparation
- › Entfernen der Füllung und Vorbereitung des apikalen Abschnitts

6%

ø 20



APICAL 2

- › Évasement et finition
- › Flaring and finishing
- › Erweiterung und Reinigung

Vitesse : 400 à 600 tr/min – **Torque :** 2 N/cm

Speed: 400 to 600 rpm – **Torque:** 2 N/cm

Geschwindigkeit: 400 à 600 U/Min – **Drehmoment:** 2 N/cm