

CMA Gold, instruments en nickel-titane avec **traitement thermique**

Séquence endodontique d'instruments canaux, pour la mise en forme et le retraitement canalaire, en endodontie mécanisée de rotation continue.

Le traitement thermique sur l'alliage NiTi procure au CMA Gold :

- Une meilleure résistance à la fatigue
- Plus de flexibilité
- Plus de résistance à la fracture

Une séquence unique et simple :

- Mêmes instruments pour la mise en forme et la désobturation canalaire
- Même séquence pour les canaux simples, courbes et fins des dents mono-radiculaires et des molaires

Des instruments sûrs :

- Les signes d'usure de la lime sont visibles à l'œil nu prévenant le risque de fracture



PROTOCOLE OPÉRATOIRE LORS DU TRAITEMENT

Exploration

➤ Évasement coronaire

➤ Élargissement de la partie médiane

➤ Longueur de travail

➤ Préparation apicale

➤ Finition avant obturation



Vitesse :
300 à 400 tr/min
Torque :
2 N/cm

PROTOCOLE OPÉRATOIRE LORS DU RETRAITEMENT

Évase-
ment et désob-
turation



Évase-
ment de la partie
médiane



Désob-
turation
et prépara-
tion apicale



Évase-
ment et finition



Vitesse :
400 à 600 tr/min
Torque :
2 N/cm

Plaquette assortie

Contenu



CMA GOLD - START KIT A
Longueur 25 mm

- 4 instruments NiTi GOLD :
1 **CORONAL** 17 mm, 1 **MEDIAN** 25 mm,
1 **APICAL 1** 25 mm, 1 **APICAL 2** 25 mm.
- 2 limes manuelles en acier 25 mm n° 10 et n° 15.



CMA GOLD - START KIT B
Longueur 21 mm

- 4 instruments NiTi GOLD :
1 **CORONAL** 17 mm, 1 **MEDIAN** 21 mm,
1 **APICAL 1** 21 mm, 1 **APICAL 2** 21 mm.
- 2 limes manuelles en acier 21 mm n° 10 et n° 15.



CMA GOLD - START KIT C
Longueur 29 mm

- 4 instruments NiTi GOLD :
1 **CORONAL** 17 mm, 1 **MEDIAN** 29 mm,
1 **APICAL 1** 29 mm, 1 **APICAL 2** 29 mm.
- 2 limes manuelles en acier 29 mm n° 10 et n° 15.


Recharge de 6 instruments rotatifs
en NiTi GOLD

Conicité

ø Pointe

Bague

Longueur
totale

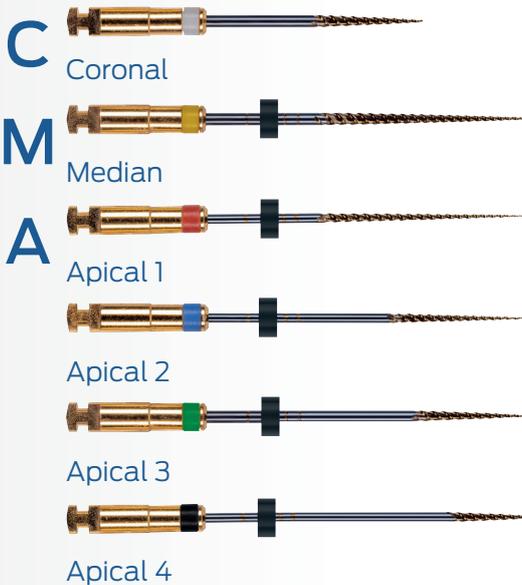

25

Blanc

17 mm



25

Jaune

21 mm

25 mm



20

Rouge

21 mm

25 mm

29 mm



20

Bleu

21 mm

25 mm

29 mm



30

Vert

25 mm



40

Noir

25 mm



CMA GOLD est fabriqué conformément aux normes européennes 93/42/CEE et 2007/47/CE.
Dispositifs médicaux de classe IIa / Marquage CE 0425 / Organisme certificateur : ICIM S.p.A.
Suivre les recommandations d'utilisation du fabricant. Photos non contractuelles.
Fabriqué par CFPM. 2 bis, chemin du Loup.
93290 Tremblay-en-France – FRANCE Tel : +33 (0)1 45 91 31 82